

Gel protecteur buccal

Gel protecteur pour les aphtes, ulcères buccaux, frottements d'appareils dentaires, gingivites et douleurs gingivales.

Composition

Triesters de glycérol oxydés (TGO) 92,7 %, excipients, arôme.

Pourquoi utiliser BUCCAGEL ?

Des études ont montré que l'application sur les muqueuses de triesters de glycérol oxydés (TGO), un ingrédient de Buccagel d'origine naturelle, restaure le film protecteur hydrolipidique et accélère le renouvellement des cellules sous-jacentes, limitant la perte hydrique. Aucun effet pharmacologique. Spécialement indiqué pour les soins des zones sensibles. Plusieurs études réalisées chez des sujets souffrant d'aphtes et d'ulcères buccaux ayant utilisé Buccagel permettent de garantir les propriétés suivantes :

89 % d'entre eux ont constaté une diminution de l'intensité de la douleur

82 % d'entre eux ont constaté une diminution de la durée des épisodes et une guérison plus rapide

70 % d'entre eux ont constaté une action rapide (en moins de deux heures)

Comment utiliser BUCCAGEL ?

Aphtes : appliquer une petite quantité de gel (de la taille d'un petit pois) directement sur l'aphte et/ou l'ulcère buccal 3 ou 4 fois par jour avec un doigt propre ou un coton-tige. Ne pas rincer la bouche après application. Suivre chaque jour des règles strictes d'hygiène bucco-dentaire. Inflammation de la gencive ou gingivite : appliquer une petite quantité de gel (de la taille d'un petit pois) directement sur les zones sensibles de la gencive 2 ou 3 fois par jour avec un doigt propre ou un coton-tige. Masser soigneusement les zones atteintes jusqu'à ce qu'une amélioration satisfaisante soit observée. Ne pas rincer la bouche immédiatement après l'application. Suivre chaque jour des règles strictes d'hygiène bucco-dentaire. Appareils dentaires, gencives douloureuses : avant d'utiliser l'appareil dentaire, masser délicatement la gencive avec un doigt propre matin et soir, ou plus fréquemment si nécessaire. Masser le gel sur la zone atteinte en appliquant de petits mouvements circulaires avant de placer l'appareil. Répéter ce processus jusqu'à ce qu'une amélioration satisfaisante soit observée. Suivre chaque jour des règles strictes d'hygiène bucco-dentaire. La durée d'utilisation recommandée est de 5 à 15 jours, dans dépasser 30 jours.

Précautions d'emploi

Ce produit a fait la preuve de sa sécurité d'emploi et de sa bonne tolérance. Il doit être utilisé comme indiqué. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin. En outre, si les symptômes persistent pendant plus de 5 à 15 jours ou en cas de détérioration, en particulier en cas de saignements prolongés, d'infection, de surinfection ou de déficit immunitaire, demandez conseil à votre médecin.

Usage externe

Gel pour application locale. Ne pas appliquer près des yeux. En cas de réactions allergiques, arrêter le traitement à titre de précaution. Indiqué chez les adultes et les enfants âgés de plus de 6 ans. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Contre-indications

Allergie à l'un des constituants. Contient de l'aspartame.

Date de la dernière révision Juin 2015

Distributeur au Liban

C.T.R Museum district – Badaro – P.O. Box 11-0525 – BEIRUT - LEBANON

Medical Device Class I 5ml

Nom et information
sur le fabricant :



Laboratoires Carliène
78360 Montesson - France



Dispositif médical conforme aux exigences
de la directive 93/42/CEE et 2007/47/CE



Consulter
la notice



N° de lot



Date de
péréemption